



HEXAWOL® Fix

Schnelldesinfektion

VAH, DVG und IHO gelistet



Gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf der Basis von Ethanol zur wirksamen und schnellen Desinfektion von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Besonders für unzugängliche Flächen geeignet. **HEXAWOL® Fix** ist parfümfrei und rückstandsfrei. Daher besonders für die Schnelldesinfektion in der Lebensmittelindustrie und im Küchenbereich geeignet. Gute Hautverträglichkeit, deshalb besonders für Allergiker und hautempfindliche Personen zu empfehlen, da parfüm- und aldehydfrei. Auf Grund der aldehydfreien Formulierung sind Verfärbungen von Oberflächen nach Anwendung von **HEXAWOL® Fix** nahezu ausgeschlossen. Es entspricht den gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit zur Vermeidung von sensibilisierenden Gefahrstoffen in humanmedizinischen Einrichtungen (TRGS 525/406).

In 100 g Lösung sind enthalten als wirksamer Bestandteil: 45,0 g Ethanol.

Gem. MPG: Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten. **Gem. Biozidrichtlinie:** Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art. Nicht für alkoholempfindliche Materialien wie Acrylglas geeignet.

Zur Herstellung von Tuchspendersystemen geeignet. Geprüft in Verwendung mit den Vliestüchern DESCO WIPES DT, DESCO WIPES RT oder ECO WIPES von Dr. Schumacher. Die Angaben vom Hersteller sind zu beachten.

bakterizid inkl. MRSA, levurozid

Sprühdesinfektion / EN 13697:	1 Min.*
Wischdesinfektion / EN 16615:	5 Min.*

(*gelistet in der 5-Min.-Spalte der VAH-Liste)

Tuberkulose-Bakterien (M. terrae) gern. EN 14348 wirksam gegen alle behüllten Viren wie HBV, HIV, HCV, Rota-Viren (begrenzt viruzid gem. RKI/DVV-Leitlinie)	30 Sek.
	30 Sek.

Noro-Viren (MNV - Murines Noro-Virus) gem. EN 14476 1 Min.

pH-Wert in Anwendungskonzentration ca. 7

4269	1-l-Rundflasche
4884	Sprühpistole für Rundflasche

GU 50

N-67176
N-67177

1170

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

ACHTUNG Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf/Aerosol nicht einatmen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur für den gewerblichen Gebrauch.
Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen.

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

Inhaltsstoffe:

Anwendung:

Dosierung:

Physikalische Angaben:

Art.-Nr. / Verpackung:

Produkt-Code:
nach GISBAU
BAUA Reg.-Nr.:

UN-Nr.:

Kennzeichnung:
UFI: 237Y-MQ2W-73DN-2QPH



dreiturm GmbH

ADRESSE
Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1
36396 Steinau an der Straße
FON +49 (0) 6663 970-230
FAX +49 (0) 6663 970-490
MAIL GV@dreiturm.de
WEB dreiturm.de